

APESIN swift



Toepassing en dosering




Handen of huid wassen, spoelen en drogen.




Product aanbrengen op de intacte huid en de contacttijd van 30 sec aanhouden.




Gezondheidszorg :
Product aanbrengen op het oppervlak. Inwerktijd respecteren. Wegnemen met papier of proper doekje.

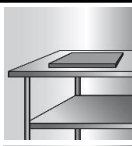

Reinig en spoel de oppervlakken.

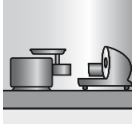

Product aanbrengen op het oppervlak. Inwerktijd respecteren. Wegnemen met papier of proper doekje

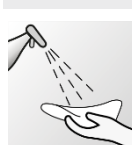

Product moet minstens 5 min. op het oppervlak blijven.



Desinfectiemiddel op alcohol basis

■ Gebruiksklaar ■ Breed spectrum desinfectiemiddel ■ PT1,PT2,PT4

- APESIN swift is een gebruiksklaar middel om kleine oppervlakken te desinfecteren.
- APESIN swift is toegelaten in België onder n° 1319B.
- APESIN swift heeft een dodende werking voor bacteriën, gisten, schimmels en virussen.
- APESIN swift is ingedeeld in het "vrije circuit".

Toepassingsgebied

PT 1: Menselijke hygiëne : enkel op intacte huidoppervlakken.

PT 2 : Oppervlakken en instrumenten gebruikt in gezondheidszorg en dierenzorg, schoonheidssalons, nagelstudios, pedicure, manicure en tattooshops.

PT 4 : Oppervlakken, toestellen en instrumenten die rechtstreeks in contact kunnen komen met voeding en dranken bij voedselbereiding en in de voedingsindustrie.

Ingrediënten: Ethanol, Isopropanol, water.

Sustainable development and production:



Productveiligheids-, opslag- en milieuinstructies

Veiligheid: Enkel voor professioneel gebruik. Niet roken. Voor bijkomende informatie raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.

Opslaan: Bij kamertemperatuur in zijn originele verpakking. Verwijderd houden van warmte, warme oppervlakken, vonken, open vuur en ontstekingsbronnen.

Milieu : Enkel volledig lege verpakkingen in de afvalcontainer gooien.

Uw vertrouwde partner:

Verkoopseenheid :

Ref: WM0714962 20 x 500 ml

pH waarde:



APESIN swift

Desinfectie activiteit van APESIN swift

ACTIVITEIT	OMSTANDIGHEDEN	CONTACTTIJD
Bactericide		
EN 1500	-	30 sec.
EN 13727	Schoon	5 min.
EN 13697	Schoon	5 min.
Levuricide (gisten)		
EN 13624	Schoon	5 min.
EN 13697	Schoon	5 min.
Fungicide		
EN 13624	Schoon	5 min.
EN 13697	Schoon	5 min.
Virucide		
EN 14476 - Poliovirus type 1	Schoon	5 min.
EN 14476 - Adenovirus type 5	Schoon	5 min.
EN 14476 - Norovirus	Schoon	5 min.
EN 14476 - Rotavirus	Schoon	5 min.